

< 18-12 >
2018年8月

先生各位

「血液培養ボトル」変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、測定装置変更に伴い、下記のとおり採取容器を変更させていただきますのでご案内申し上げます。
何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■変更内容：

変更内容	新		現	
容器名称	好気用 レズンボトル (プラスチック)	嫌気用 レズンボトル (プラスチック)	好気用 培養ボトル (プラスチック)	嫌気用 培養ボトル (プラスチック)
容器番号	37			
採取方法	本紙裏面をご参照下さい			
容器画像				

■変更日：2018年9月3日以降順次

※現検査容器につきましては、2018年11月末までご利用いただけます。

以上

血液培養は2セット採取が原則です


2セット採取

異なる2か所から採血します(皮膚消毒を徹底して)。

2セット採取の意義

検出率を向上させます。
感染源の特定を容易にします。
コンタミネーションの判断を容易にします。

皮膚の消毒

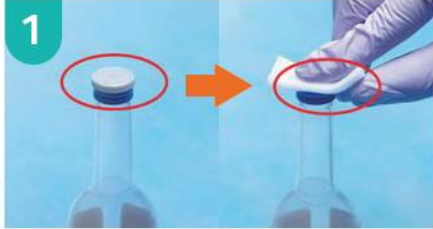

1
キャップを取り外し、ゴム栓をアルコール綿で消毒する。



2
皮脂や蛋白汚れを落とし、消毒効果を高めるため、アルコールで広範囲にごしごし消毒する。



3
消毒薬は作用時間を保つ。
・ポビドンヨード:2分
・クロルヘキシジンアルコール:30秒



4
消毒後は滅菌手袋以外で穿刺部位を触らない。必要量を採血する。



5
ボトルに血液を注入する。針刺し損傷を防止する安全器材を使用することが可能です。

販売名:BDバキュティナシステム
医療機器認証番号:15000BZY00702000

BD バキュティナ® ブラッド トランスファー デバイス




6
数回静かに転倒混和し、提出まで室温で保管する。

診療報酬 細菌培養同定検査

区分	項目名	保険点数
D18 3	血液又は穿刺液	210
D18 注	嫌気性培養加算	115

血液培養は、2か所以上から採血した場合、2回の算定が可能です。
嫌気培養ボトルを併用した場合、嫌気培養加算も2回の算定が可能です。

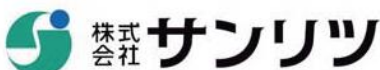

株式会社 サンリツ
本社:〒 276-0022 千葉県八千代市上高野1353-25
TEL:047-487-2631 FAX:047-487-2861
www.san-g.com/



製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地
本社:〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
カスタマーサービス ☎0120-8555-90 FAX:024-593-3281
bd.com/jp/